

Lumbofix® (Typ 420 Rücken)

Sachgemäßer Gebrauch

Die Fixierung ist ein Artikel, der dafür gedacht ist, zusammen mit einem EMS- oder TENS-Gerät benutzt zu werden, um die Anlage von selbstklebenden Elektroden zu erleichtern. Platzierung der Elektroden wie durch den Arzt angewiesen.

Sicherheitsmaßnahmen und Gefahrenhinweise

Nicht benutzen, wenn die Fixierung nass ist. Nur für eine Person geeignet. Sicherstellen, dass die Fixierung bei jeder Behandlung genau so angelegt wird, wie vom Arzt angewiesen. Beim Auswechseln von Elektroden darauf achten, dass diese wieder in Originalposition angebracht werden, wie vom Arzt angewiesen. Lumbofix® ist keine Bandage. Fixierung nicht benutzen, sollten irgendwelche Kabelisolierungen beschädigt und Kupferkabel sichtbar sein.

Inhalt

Lumbofix® Fixierung (P/N: 9020-1810)
Selbstklebende Elektroden (Typ 722/723/725/726)
Gebrauchsanweisung

Zubehör

Selbstklebende Elektroden (Typ 722/723/725/726)
Selbstklebende Elektroden
entweder Typ 722 x 4 (5 cm rund)
oder Typ 723 x 4 (7 cm rund)
oder Typ 725 x 4 (4,6 cm quadratisch)
oder Typ 726 x 4 (4,6 x 8,5 cm rechteckig).
Es sollten nur von **neurotech**® genehmigte Elektroden für diese Fixierung verwendet werden. Ersatzelektroden sollten direkt bei **neurotech**® bestellt werden. Alle Elektroden sind mit einer separaten Gebrauchsanweisung ausgestattet.

Fehlerbehebung

Problem: Patient spürt kein Stromgefühl
Mögliche Ursache: - Schutzfolien der Elektroden nicht abgezogen
- Gerät nicht angeschaltet
- Kabel nicht angeschlossen
Lösung: - Schutzfolie abziehen
- Gerät anschalten
- Kabel verbinden

Fixierung kann zusammen mit folgenden Geräten benutzt werden

| | |
|--------------------|--------------------|
| PolyStim XP® 282 | OmniTens XP® 459 |
| MediStim plus® 291 | MediTens plus® 290 |
| OmniTens plus® 457 | PolyStim plus® 272 |
| PolyStim® 262 | OmniTens® 455 |
| MediStim XP® 281 | MediTens XP® 458 |

Spezifikation Umwelteinflüsse

Betriebsbedingungen: 1. Temperatur: 0 - 35° C (32 - 95° F)
2. Luftfeuchtigkeit: 20 - 65 % RH
Lagerbedingungen: 1. Temperatur: 0 - 55° C (32 - 131° F)
2. Luftfeuchtigkeit: 10 - 90 % RH

Materialzusammensetzung


Außenmaterial: 80 % Nylon, 20 % Elasthan
Innenmaterial: 100 % Polyurethan
Gurt: 100 % Nylon
Gurtbefestigung: 100 % Nylon

Pflege Ihrer Fixierung

Elektroden vor dem Waschen entfernen.
Handwäsche in lauwarmem, seifigem Wasser.
Zum Trocknen flach hinlegen. Die Elektroden wieder an die ursprünglichen Positionen platzieren.


 Handwäsche


 Nicht bügeln

 Nicht schleudern

 Nicht in die Reinigung geben

 Nicht bleichen

 Gebrauchsanweisung vor Gebrauch lesen

 Dieses Symbol auf Ihrem Produkt zeigt an, dass es der Richtlinie 93/42/EWG für medizinische Produkte entspricht.


2 Jahre Garantie.

Die Fixierung gibt es in einer Einheitsgröße, sie deckt Taillenumfänge von 62 - 142 cm ab.

Entsorgungshinweise

Benutzte Produkte sollten nicht verbrannt, sondern gemäß den Bestimmungen Ihres Landes für solche Artikel entsorgt werden.

Entwickelt und hergestellt für

 Bio-Medical Research Ltd.
Parkmore Business Park
West, Galway, Irland



Für Fragen und weitere Informationen


neurotech®

Bio-Medical Research GmbH
In Oberwiesen 18, D-88682 Salem, Deutschland
www.neurotechgroup.com

Patienten-Serviceline: 0180 2 330 330

(6 Cent pro Gespräch aus dem deutschen Festnetz.
Aus Mobilfunknetzen sind Preise bis maximal 42 Cent pro Minute möglich.)

neurotech®

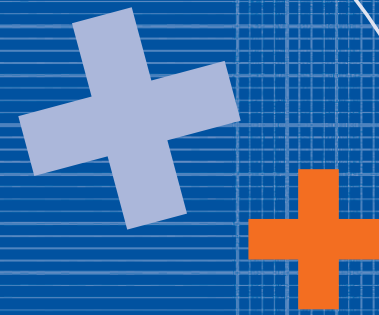


Gebrauchsanweisung


Lumbofix®

Spezielle Fixierung für Elektroden


Packungsinhalt:

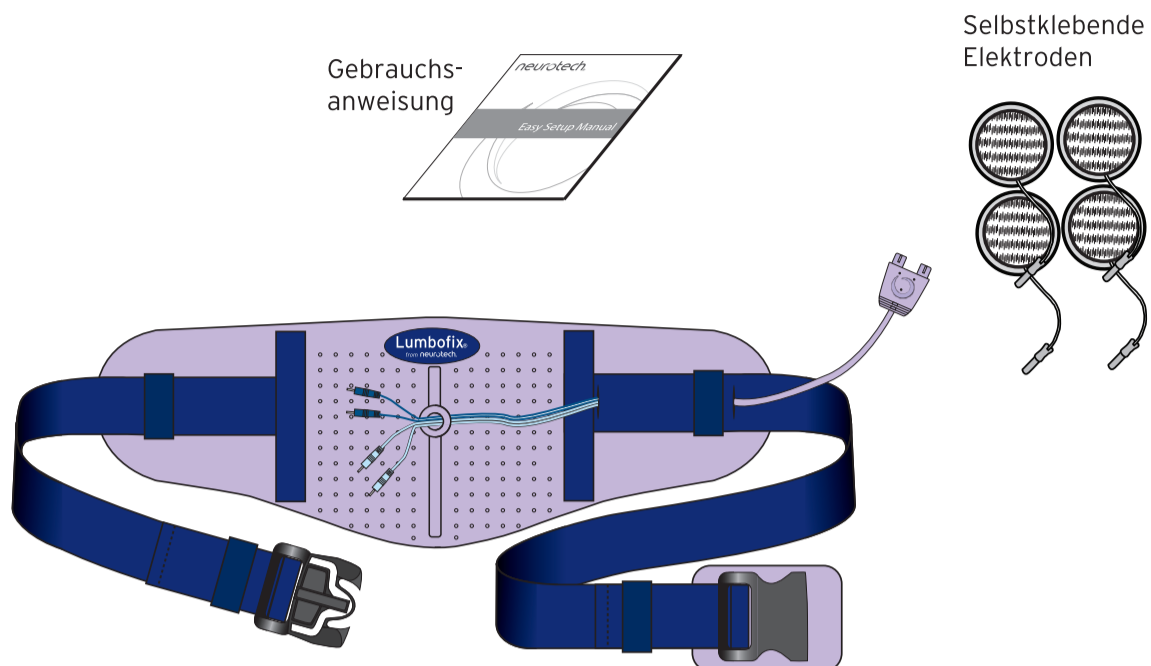

Schritt 1: Platzieren Sie die Elektroden, wie vom Arzt angewiesen, innerhalb der Markierungen.

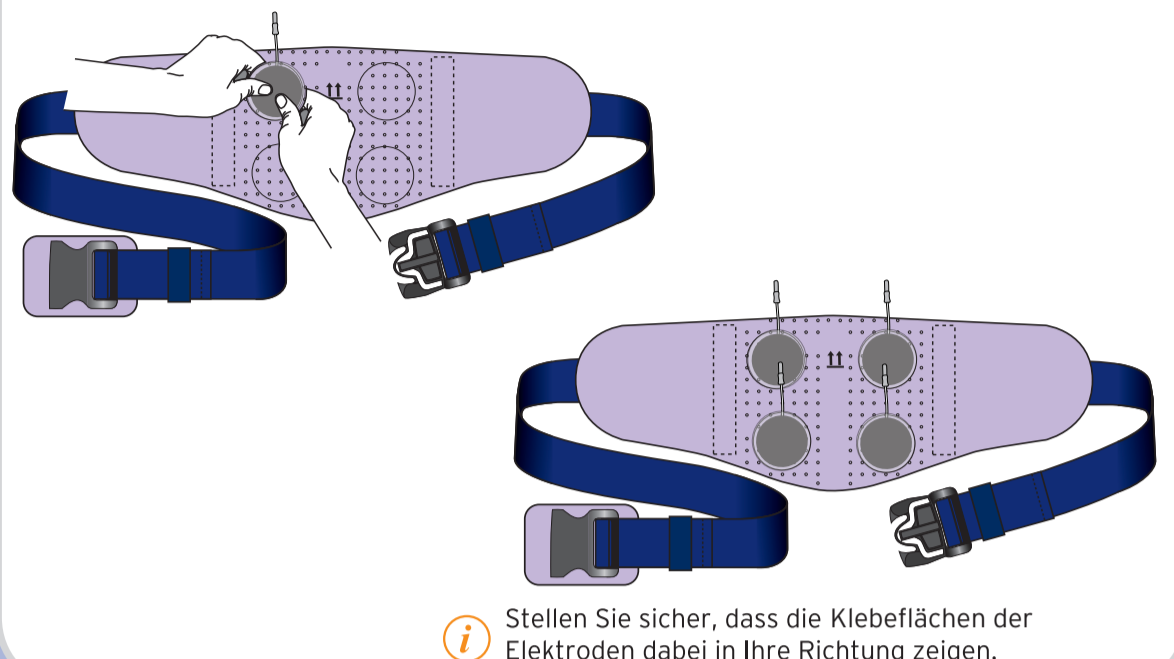


Schritt 2: Elektrodenkabel durch das nächstgelegene Loch durchstecken.

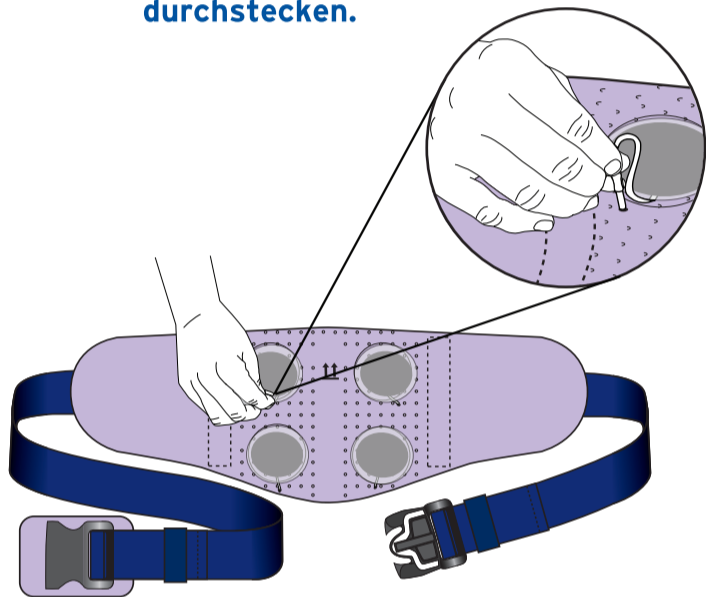


Schritt 3: Verbinden von Kabelsteckern und Elektrodenkabeln.


Farbige Kabelstecker mit den Elektrodenkabeln verbinden.

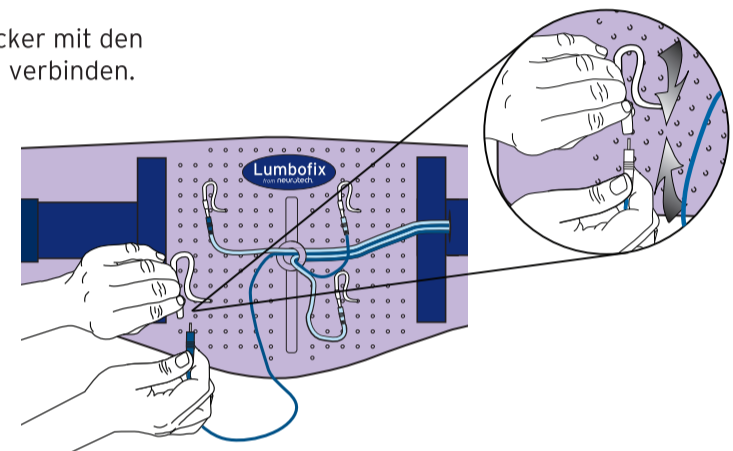


Schritt 4: Entfernen der durchsichtigen Schutzfolie von den Elektroden.

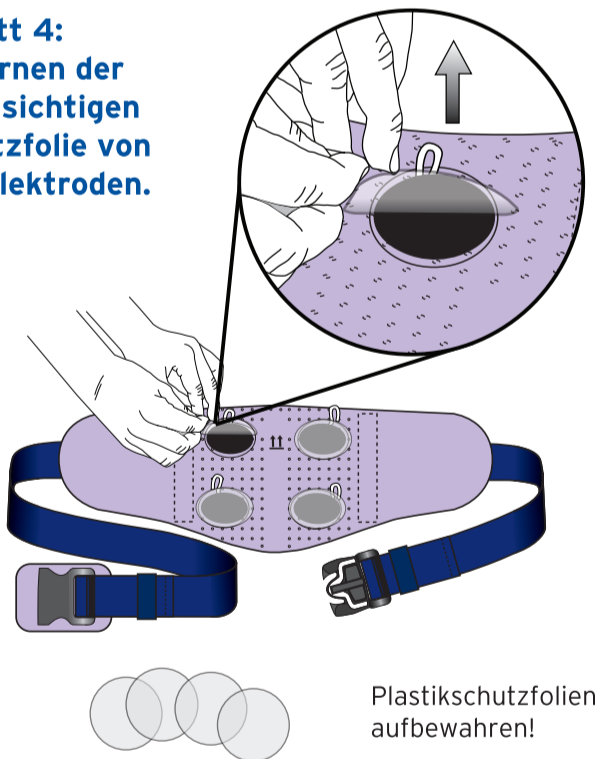

Schritt 5: Fixierung um die Taille anlegen.

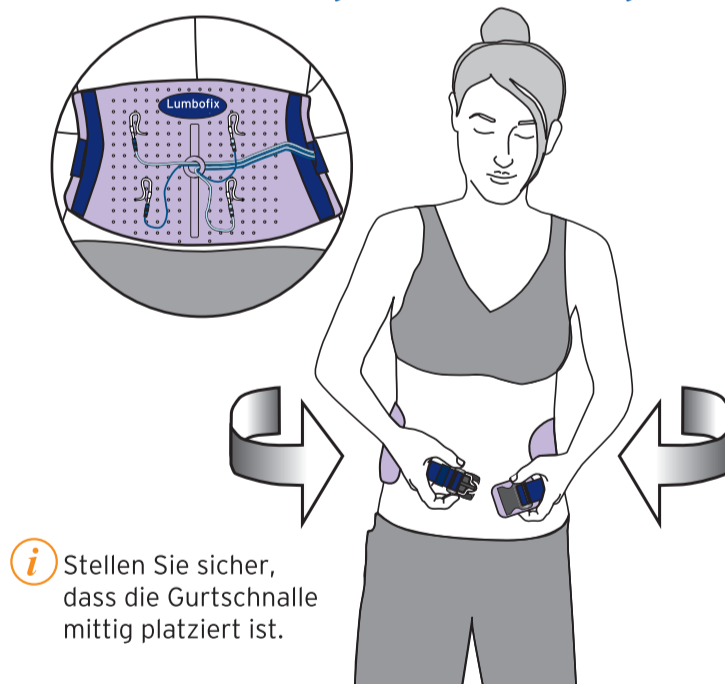

Schritt 6: Gurt der Fixierung schließen.

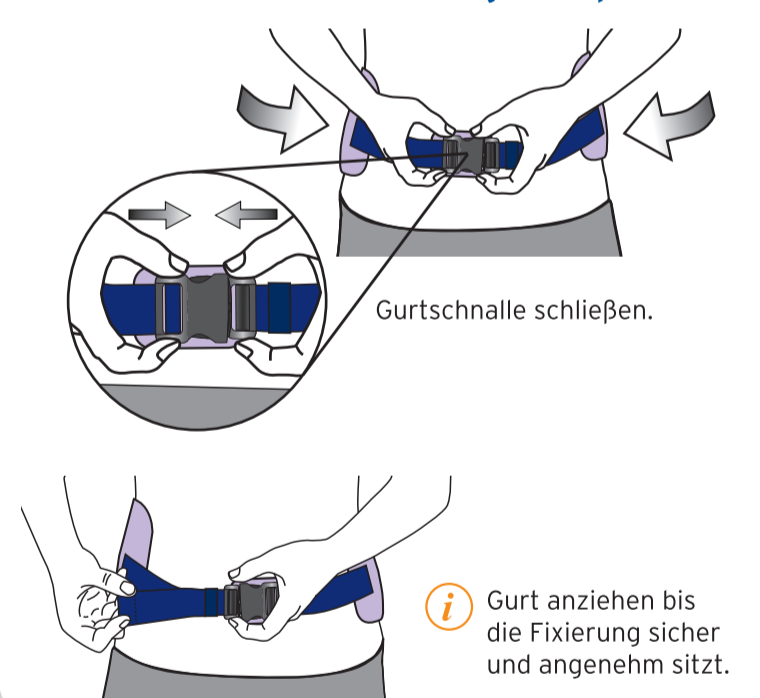

Verbinden von Lumbofix® mit einem EMS- oder TENS-Gerät.




- i* **Warnhinweise:**
- Es sollte nur ein von neurotech® genehmigtes Gerät verwendet werden.
 - Vor Verbinden der Fixierung mit einem TENS- oder EMS-Gerät Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und Schritt-für-Schritt befolgen.

- Vor jeder Behandlung:**
- Schutzfolien von den Elektroden abziehen.
 - Lumbofix® anlegen und festziehen.
 - TENS/EMS-Gerät einschalten.


- i* Kabel mit Gerät verbinden wie hier beschrieben.

Abnehmen der Fixierung.


Nach der Behandlung:
TENS/EMS-Gerät ausschalten.

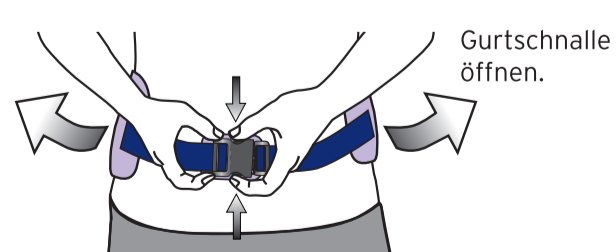

...Fixierung langsam abnehmen, dabei sicherstellen, dass alle Elektroden daran haften bleiben.

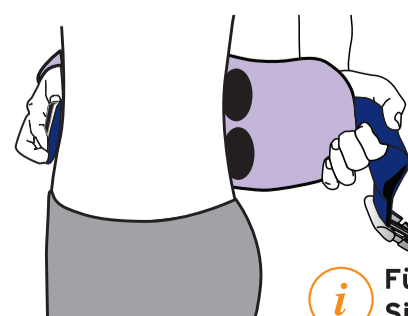

Plastikschutzfolien wieder auf den Elektroden anbringen.

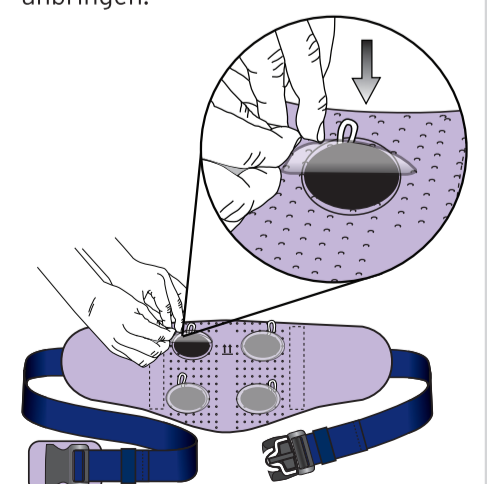

- i* Für die tägliche Handhabung beachten Sie bitte die Schritte 4 - 6.